



6071 - SANITAROSA™ GA

Désinfectant pour instruments médicaux ; Glutaraldéhyde 2% ; Prêt-à-l'emploi

COMPOSITION

Glutaraldéhyde 2%, agents stabilisants, détergents non ioniques, tampons, inhibiteurs de corrosion, eau distillée.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide, fongicide, tuberculocide, virucide and sporicide. Actif contre les bactéries, les levures, les moisissures, les virus, les mycobactéries en 10 minutes, les spores de bactéries en 1 heure.

Testé selon: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 et EN 14374.

MODE D'EMPLOI

PRODUIT PRET A L'EMLOI





- 1- Etape de pré-désinfection: Nettoyer le dispositif médical avec un produit type: LIQUISEPT OU WARECLEAN.
- 2- Etape de désinfection: verser la solution dans un bac.
temps de contact: 15 min
temps de conservation maximum du bain: 14 jours
- 3- Rincer soigneusement le dispositif médical.
- 4- Essuyer avec un champ à usage unique.

CONDITIONNEMENTS - RÉF

4 bidons de 5 L

06071-5000



-  Ne nécessite pas d'activation !
-  pH 6,0 +/- 0,4.
-  Actif contre les bactéries, les levures, les moisissures, les virus, les mycobactéries en 10 minutes
-  Actif contre les spores de bactéries en 1 heure.



Représentant Exclusif en Algérie

Medical Proximity M'sila dz
Cité cheikh taher N°: S/2 M'sila 28000 – Algérie .
Tel/Fax: +213 (0) 35 33 80 60
Mobile: +213 (0) 560 00 22 69 / 70 / 71
Email: medproximity.dz@gmail.com